

Массажное кресло Valencia

Руководство
пользователя

Внимательно ознакомьтесь с руководством

Благодарим за покупку нашего массажного кресла.
Внимательно прочитайте данное руководство пользователя для правильной сборки и эксплуатации массажного кресла.
Сохраните данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для справки.





▶ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	1
НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ	4
Внешнее строение	4
Внутреннее строение	4
Пульт управления	5
Инструкция к пульту управления	5
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9
Активация голосового управления	9
Голосовые подсказки	10
ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ	11
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	12
Распаковка массажного кресла	12
Перемещение массажного кресла	13
Подключение питания	13
Способ установки	14
Защита напольного покрытия	15
Запуск массажного кресла	16
Перед посадкой в кресло	16
Раскладывание подножки	17
Воспроизведение музыки	17
После использования	17
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	18
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19

▶ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


Меры предосторожности

- ▶ Перед использованием массажного кресла внимательно прочтите раздел ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
- ▶ Соблюдение описанных ниже мер предосторожности и предупреждений обеспечит надлежащую эксплуатацию массажного кресла.
- ▶ Несчастные случаи, вызванные некорректной эксплуатацией, подразделяются на "ВНИМАНИЕ" и "ОСТОРОЖНО".
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с данным разделом и соблюдайте инструкции.


	ВНИМАНИЕ	Ненадлежащая эксплуатация может привести к травме пользователя.
	ОСТОРОЖНО	Ненадлежащая эксплуатация может привести к травме пользователя или повреждению массажного кресла.
	Запрещено	
		НЕ разбирать

Не подходит для следующих лиц


Людам с описанными ниже симптомами рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла.

	ВНИМАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Люди с кардиостимуляторами и прочими электронными устройствами в теле. ◆ Люди, проходящие лечение, особенно с плохим самочувствием. ◆ Люди со злокачественными опухолями, острыми заболеваниями, заболеваниями сердца или тяжелой гипертензией. ◆ Беременные женщины и женщины во время менструации. ◆ Люди с остеопорозом, деформацией суставов, дисфункциями или свежими переломами. ◆ Люди с серьезными кожными заболеваниями. ◆ Поверхность кресла нагревается, поэтому людям, не чувствительным к нагреванию, необходимо уделять этому особое внимание. (Использование под наблюдением) ◆ Массажное кресло не предусмотрено для использования физически, эмоционально и ментально неполноценные люди, а также не обладающими необходимым опытом и знаниями, если не находятся под наблюдением и не получили надлежащий инструктаж.
---	-----------------	--

Меры предосторожности при работе с пультом управления


	ОСТОРОЖНО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Не используйте пульт управления влажными руками, и не тяните за шнур пульта управления. ◆ Не проливайте воду и другие жидкости на пульт управления во избежание поломок. ◆ Не кладите тяжелые предметы на пульт управления.
---	------------------	---

Меры предосторожности при использовании шнура питания





	ОСТОРОЖНО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Напряжение сети должно совпадать с указанным в руководстве напряжением кресла. ◆ Не отключайте шнур питания влажными руками во избежание удара электрическим током. ◆ Не тяните за шнур питания, держитесь за вилку или штекер. ◆ Не пережимайте шнур питания тяжелыми предметами. ◆ Не повреждайте, не пережимайте, не тяните с силой и не скручивайте шнур питания. ◆ Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя, в сервисном центре или у любого уполномоченного представителя во избежание опасных ситуаций.
---	------------------	---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Условия эксплуатации

 ОСТОРОЖНО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Не используйте устройство при температуре выше 40 С. ◆ Не используйте устройство во влажных и пыльных помещениях. ◆ Отключите устройство из розетки во время грозы. ◆ Не используйте устройство на улице. ◆ Установите устройство на ровный пол. ◆ Не храните у источников нагревания или открытого огня.
---	--

Безопасная эксплуатация

 ОСТОРОЖНО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Максимальные вес пользователя - 120кг. ◆ Не используйте другие терапевтические устройства с данным массажным креслом. ◆ Используйте данное массажное устройство только описанным в руководстве образом. ◆ Устройство должно использоваться только одним человеком, два или более человека не могут использовать его одновременно во избежание повреждения устройства. ◆ Не используйте устройство сразу после еды, это может спровоцировать дискомфорт. ◆ Снимите все украшения с рук и опустошите карманы перед использованием. Проверьте обивку под подушками и в других местах. При наличии повреждений не используйте устройство и обратитесь за квалифицированной помощью. ◆ Если вы испытываете дискомфорт во время использования устройства, немедленно отключите питание и прекратите использование. ◆ Рекомендуется использовать устройство не дольше 20 минут за один раз. ◆ Убедитесь что позади кресла нет никаких препятствий и достаточно места, прежде чем настраивать угол наклона спинки и подставки для ног. ◆ Убедитесь что на спинку и подставку для ног не оказывается чрезмерное давление. Не допускайте детей, домашних животных и другие препятствия к креслу во время откидывания спинки и опоры для ног во избежание случайных травм. ◆ Правильно садитесь в кресло во избежание травм и повреждения устройства. ◆ Не тяните и не толкайте кресло, стоящее на колесиках, по деревянному полу и ковру во избежание повреждений.
 ЗАПРЕЩЕНО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Не используйте устройство с поврежденными/оголенными деталями или протечками. ◆ Не становитесь сами и не складывайте тяжелые предметы на подставку для ног. Дети не должны играть с устройством и должны использовать его под наблюдением. Не засыпайте во время использования устройства. ◆ Не используйте устройство под воздействием алкоголя. ◆ Не кладите руки и посторонние предметы в зазоры устройства во избежание травм пользователя и повреждения устройства. ◆ Если во время использования от устройства исходит дым или странный запах, немедленно прекратите эксплуатацию.
 НЕ РАЗБИРАТЬ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Не разбирайте устройство во избежание поломок. ◆ Не пытайтесь ремонтировать или разбирать устройство без разрешения. ◆ Свяжитесь с авторизованным дилером или агентом по обслуживанию.
 ОТКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Отключите шнур питания из розетки перед обслуживанием. ◆ Никогда не подключайте и не отключайте шнур питания влажными руками во избежание удара электрическим током или травм. ◆ После использования отключите шнур питания из розетки. ◆ Отключите шнур питания из розетки при отключении электричества.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

№.	Проблема	Возможная проблема	Возможное решение
1	Шум во время работы	Звук во время работы - это норма. Его издает двигатель или другие механические детали, трущиеся об обивку	Нет необходимости принимать меры
2	Массажное кресло не запускается	Шнур питания не до конца вставлен в выход питания	Правильно подключите штекер в выход питания
		Переключатель питания выключен	Включите переключатель
		Перегорел предохранитель	Замените предохранителем такого же типа и номинала
3	Спинка и подножка не поднимаются и не опускаются	На спинку или подножку оказывается чрезмерное давление	Уменьшите нагрузку и попробуйте снова
4	Не работает пневмоподушка	Заблокирован воздушный шланг	Выпрямите воздушный шланг и удалите засор
5	Из динамиков не звучит музыка	Установлен минимальный уровень громкости	Отрегулируйте громкость с моб. устройства
6	Массажное кресло перестало работать в процессе массажа	На массажное кресло оказывается большое давление	Слегка приподнимите спину/спинку

Если проблема не решится, свяжитесь с дилером для проведения обслуживания. Важно: Не пытайтесь ремонтировать массажное кресло самостоятельно. Наша компания не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные неавторизованным обслуживанием. Благодарим за сотрудничество.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Массажное кресло Valencia
 Номинальное напряжение: 220~
 Номинальная частота: 50Гц
 Номинальная мощность: 100Вт
 Класс безопасности: Класс I

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкция по уходу

- ▶ Для удаления пятен на задней панели, подлокотнике, подножке, пластиковых деталях или воздухоотводе протрите пятно мягким моющим средством, а затем вытрите сухой тканью.
- ▶ Для удаления пятен на пульте управления и блоке питания протрите их сухой тканью.
- ▶ Для удаления пятен на спинке или подушках используйте только средство для чистки обивки на водной основе, протрите пятно влажной тканью и высушите на воздухе.
- ▶ Чтобы почистить кожу подножки, снимите ее с кресла, постирайте вручную с мягким моющим средством, затем высушите в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Дети не должны играть с массажным креслом. Дети не должны производить очистку и обслуживание массажного кресла без наблюдения взрослых.
- ▶ Отключите шнур питания из розетки перед уходом и обслуживанием.
- ▶ Во избежание удара электрическим током или травм не трогайте шнур питания влажными руками.
- ▶ Избегайте попадания моющего средства в блок питания во время очистки.
- ▶ Не используйте бензин, растворитель или другие разбавители при очистке массажного кресла, это может привести к потере цвет и повреждению массажного кресла.
- ▶ Не утюжьте обивку.

Способы хранения

- ▶ Накройте массажное кресло тканью, не пропускающей пыль, во избежание накопления на нем пыли, если оно не используется в течение длительного времени.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не оставляйте массажное кресло под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Это может привести к выгоранию и повреждению.

Перегревание

Во время эксплуатации обращайте внимание на следующие моменты:

- ▶ Запах гари.
- ▶ Включение и отключение массажного кресла при касании к шнуру
- ▶ питания. Шнур питания горячий.
- ▶ Другие отклонения от нормы.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Прекратите эксплуатацию массажного кресла во избежание поломок и несчастных случаев в описанных выше ситуациях.
- ▶ Выключите переключатель питания и отключите вилку из розетки. Свяжитесь с местным дилером для проведения ремонтных работ.
- ▶ Любое обслуживание кроме описанных выше процедур должно проводиться авторизованным дилером или сервисным центром.

ВНИМАНИЕ

Отключите шнур питания из розетки перед проведением процедур по уходу и обслуживанию. Во избежание удара током или травмирования не трогайте шнур питания влажными руками. Не пытайтесь самостоятельно разобрать и отремонтировать массажное кресло. Отправьте кресло в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная эксплуатация




ОСТОРОЖНО


- ◆ Не накрывайте массажное кресло одеялом или подушкой. Это может привести к чрезмерному нагреванию.
- ◆ Вилка должна совпадать с розеткой. НЕ используйте удлинитель во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания.
- ◆ НЕ используйте массажное кресло в местах с высокой концентрацией летучих соединений во избежание возгорания или повреждения кресла.
- ◆ Не используйте растворители и медицинский спирт для очистки кресла. Не распыляйте инсектициды на кресло.
- ◆ Парализованные люди не могут использовать данное массажное кресло во избежание физического дискомфорта или травм.
- ◆ НЕ скручивайте шнур питания во избежание повреждения, возгорания или короткого замыкания.
- ◆ Запрещается использовать массажное кресло без одежды.
- ◆ НЕ садитесь на подножку или подлокотник во избежание несчастного случая.
- ◆ НЕ используйте массажное кресло вблизи источников тепла, открытого огня или на полу с подогревом.
- ◆ Не курите в массажном кресле во избежание возгорания.
- ◆ НЕ используйте массажное кресло, будучи мокрым, во избежание поражения электрическим током.
- ◆ Не рекомендуется использовать массажное кресло более 5 минут для определенной части тела.
- ◆ Продолжайте массировать одну и ту же часть тела с интервалом в 30 минут.
- ◆ Никогда не используйте массажное кресло, если в него попала вода или какой-либо посторонний предмет, или если оно повреждено.
- ◆ Перед использованием проверьте переключатель питания во избежание несчастного случая.

▶ НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

Внешнее строение

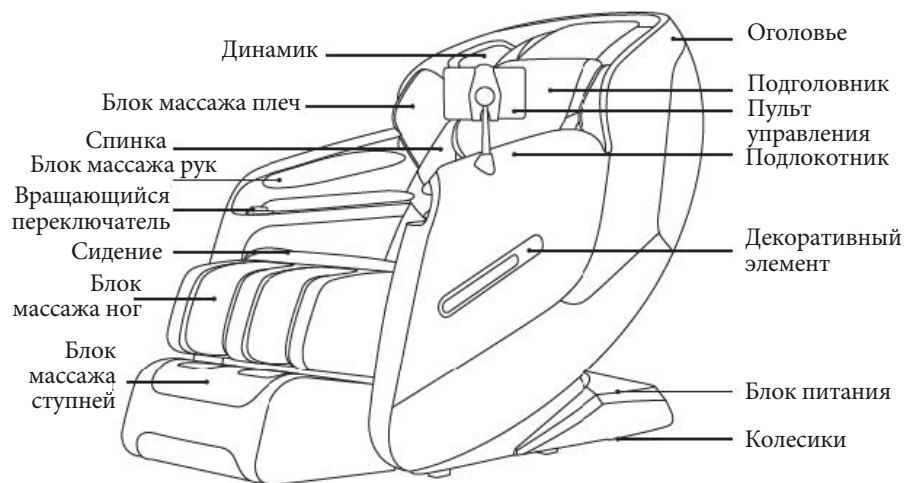

Внутреннее строение

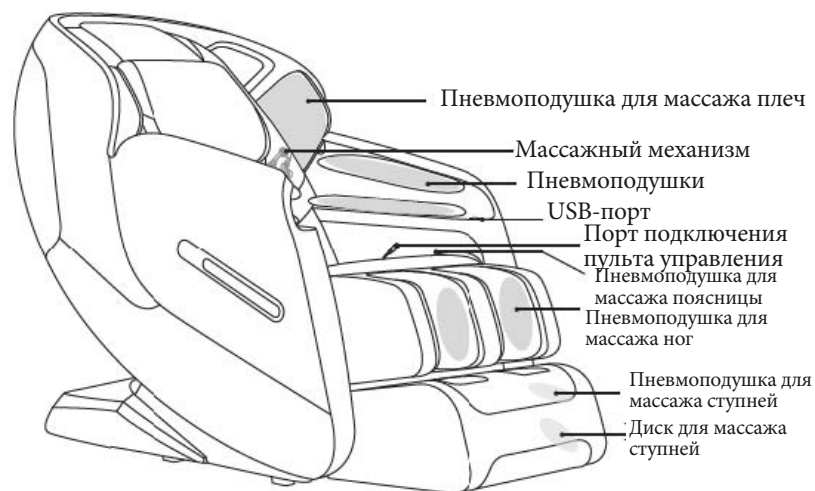

Примечание: когда массажное кресло включено, USB-порт можно использовать для зарядки личных устройств (его можно использовать только в качестве зарядного устройства).


▶ ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Раскладывание подножки

Поставьте ноги на подножку, чтобы разложить ее до желаемой длины для лучшего массажа.

Подножка разложена

Подножка сложена

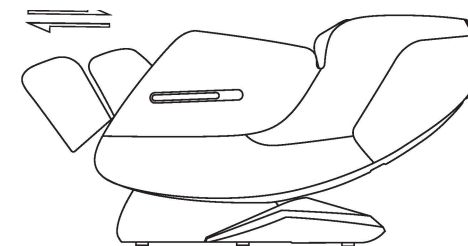

Вы можете сложить подножку до желаемой длины для лучшего массажа.



ВНИМАНИЕ

- ▶ Не играйте на массажном кресле и используйте его надлежащим образом.
- ▶ Убедитесь, что раскладыванию и складыванию спинки и подножки ничего не препятствует.
- ▶ Не кладите ноги, пальцы и другие предметы в зазоры кресла, когда оно поднимается, опускается или возвращается в положение по умолчанию.
- ▶ Убедитесь, что массажное кресло вернулось в положение по умолчанию, прежде чем встать с массажного кресла.

Воспроизведение музыки

- ▶ Для воспроизведения музыки включите Bluetooth на своем устройстве с системой Android/Apple iOS и синхронизируйте его с массажным креслом. (Название: A50).


После использования

- ▶ Всегда отключайте массажное кресло из розетки после использования.
- ▶ Выключайте переключатель питания и отключайте массажное кресло из электрической розетки, когда оно не используется, во избежание случайного включения массажного кресла детьми.
- ▶ Если массажное кресло не используется в течение длительного времени, рекомендуется накрыть его, смотать шнур питания, и переместить его в помещение без пыли и излишней влажности.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Запуск массажного кресла

- ▶ С помощью пульта управления опустите спинку сиденья в самое нижнее положение, поднимите и выдвиньте подножку в верхнем положении. Перед запуском убедитесь, что вокруг кресла достаточно свободного места.
- ▶ После сеанса массажа верните спинку и подножку в исходное положение и выключите переключатель питания. Чтобы выбрать программу массажа, см. Экран пульта управления и Инструкции к пульта управления.

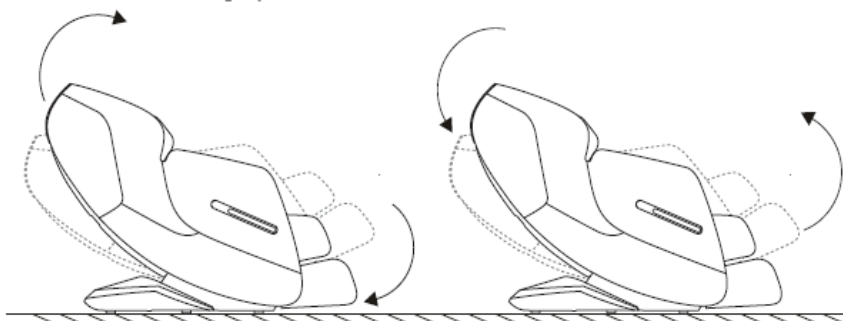

Перед посадкой в кресло

- ▶ Перед тем как сесть в массажное кресло, убедитесь, что подножку надежно собрана.
- ▶ Убедитесь, что массажное кресло вернулось в исходное положение, прежде чем садиться на него.
- ▶ Если какой-либо компонент не находится в исходном положении, выключите массажное кресло, чтобы оно восстановилось.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не садитесь в кресло с поднятой подножкой.
- ▶ Не оказывайте чрезмерное давление на подножку во избежание ее повреждения.


НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ


Экран пульта управления





Инструкции к пульта управления

Функции

 **Мастер массажа**
Благодаря умеренной интенсивности программа "Мастер массажа" эффективно способствует облегчению усталости тела. Эксклюзивные техники массажа помогут облегчить неприятные ощущения, такие как напряжение в шее, плечах, пояснице и спине. В сочетании с успокаивающей музыкой он поможет расслабить ум и снять усталость.


 **Восстановление после спорта**
Программа "Восстановление после спорта" помогает расслабить все тело. Она поможет эффективно облегчить мышечную боль в шее, плечах, спине, пояснице, ногах и другой дискомфорт после тренировки, растянуть мышцы, снять усталость тела и расслабить напряженные мышцы.


 **Мягкий уход**
В сочетании с ритмичным покачиванием данная программа массажа поможет улучшить кровообращение и расслабить тело и разум, эффективно облегчить дискомфорт в теле, вызванный недостатком сна, а также избавит от дискомфорта в теле, вялости, замедленной реакции, головной боли и плохой памяти. Она поможет успокоиться и снять напряжение.


 **Успокаивающая музыка**
Когда запущена программа автоматического массажа, нажмите эту клавишу, чтобы выключить успокаивающую музыку (настройка по умолчанию: вкл), нажмите ее еще раз, чтобы изменить громкость музыки 1, 2, 3 или выключить ее; нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы выключить/включить голосовые подсказки.


▶ НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

Автоматические программы массажа

-  Семейный режим - Королевское похужение
Индивидуальная программа массажа, которая понравится дамам. Она предлагает индивидуально подобранную технику массажа для расслабления, не выходя из дома.
- Семейный режим - Массаж для мужчин
Индивидуальная программа массажа для мужчин. В ней используются рекомендуемые техники массажа для пользователей мужского пола, чтобы расслабиться, освежить тело и разум.
- Семейный режим - Программа для пожилых пользователей
Специальная программа массажа, разработанная для пожилых людей. В ней используются очень мягкие и медленные техники массажа, помогающие очистить меридианы.

-  Облегчение боли - Шея и плечи
Данная программа использует техники разминания, шиацу, подъемного и тянущего массажа, чтобы облегчить боль и расслабить шею и плечи.
- Облегчение боли - Поясница и бедра
Данная программа нацеливает ролики на глубокие ткани поясницы и бедер, чтобы успокоить затекшие мышцы и снять напряжение.
- Облегчение боли - Спина и позвоночник
Данная программа использует комбинацию техник глубокого массажа тканей и фокусируется на мышцах вдоль позвоночника, верхней и нижней части спины и поясничного отдела.


-  Время отдыха - Режим игры
Подходит для наслаждения массажем в свободное время для снятия напряжения.
- Время отдыха - Режим кофебрейк
Подходит для наслаждения массажем, когда вы собираетесь с друзьями, пьете кофе или блатаете.
- Время отдыха - Режим быстрого сна
Подходит для перерыва в середине дня, чтобы снять напряжение, улучшить пищеварение и освежить тело.

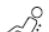-  Точечный массаж
Нажмите эту клавишу для переключения между массажем шеи, плеч, спины, поясницы, бедер и ног. Индикатор выбранной части загорается и мигает.
- Массаж шеи: помогает облегчить боли в шее. Уникальные техники «разминания и шиацу», а также «подъем и тяга» помогут эффективно облегчить усталость и скованность в шее пользователя.
- Массаж плеч: предназначен для облегчения напряжения в плечах. Использует уникальную технику «разминания и постукивания», чтобы снять усталость и облегчить боль в плечах.
- Массаж спины: следуя изгибам человеческого тела, эта программа массажа использует комбинацию массажных техник перекачивания, толкания и надавливания, чтобы помочь снять усталость.
- Массаж поясницы: с помощью комфортного массажа пневмоподушками в сочетании с разминающим массажем и другими методами массажа поясницы может облегчить напряжение в пояснице, накопление жировой ткани в зоне поясницы и повысить ее гибкость.
- Массаж бедер: малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению кровообращения в бедрах. Массаж бедер поможет улучшить кровообращение. Используя техники разминания, шиацу и синхронного массажа, программа поможет сформировать и тонизировать мышцы бедра.
- Массаж ног: индивидуальные методы разминания помогут улучшить кровоснабжение, восстановление, стимулировать лимфатический дренаж и уменьшить боль.



▶ ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Защита напольного покрытия

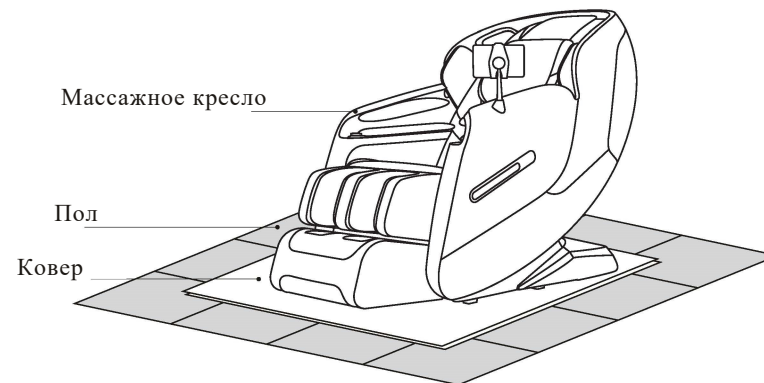
- ▶ Рекомендуется устанавливать кресло на ковер или мягкий мат во избежание повреждения напольного покрытия.



Окружающее пространство

-  Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности, например, рядом с бассейном или ванной комнатой, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
-  Держите массажное кресло вдали от нагретых поверхностей, чтобы предотвратить возгорание или повреждение кресла.


Заземление

-  Данное массажное кресло должно быть заземлено, вилка должна быть подключена к соответствующей заземленной розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и постановлениями для снижения риска поражения электрическим током.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Место установки

- Свободное пространство вокруг массажного кресла:
- Убедитесь, во время установки вокруг кресла достаточно места: требуется зазор в 10 см для наклона спинки, а также зазор 60 см для раскладывания подножки и выдвигания кресла вперед.
- Устанавливайте кресло в 1 метре от телевизора, радио или других аудио-/видео-устройств, во избежание помех.

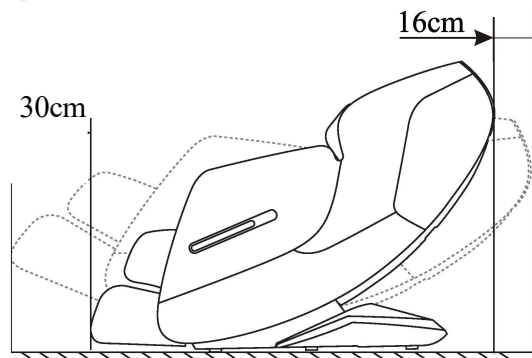

- Расстояние между розеткой и переключателем питания должно быть в пределах 1,5 метров.

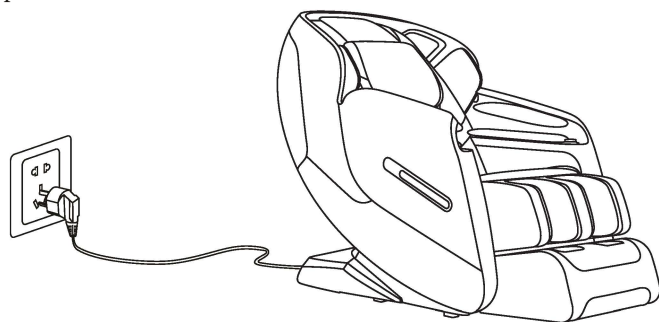









ОСТОРОЖНО







- Расстояние между розеткой и переключателем питания должно быть в пределах 1,5 метров во избежание повреждения шнура питания при выдвигании массажного кресла вперед.
- Выпрямляйте шнур питания во время использования, чтобы избежать его запутывания или повреждения.
- Когда массажное кресло выдвигается вперед или назад, убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или других препятствий во избежание несчастного случая.

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

Другие клавиши

-  **Клавиша питания:**
Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить/выключить пульт управления. Нажмите и удерживайте эту клавишу после подключения к источнику питания, чтобы запустить массажное кресло. По умолчанию запускается программа массажа "Мастер массажа".
Автоматическое сканирование тела: массажное кресло автоматически запускает сканирование тела перед массажем, загорается соответствующий индикатор. Регулировка положения механизма: когда механизм находится сверху/внизу, загорается индикатор. Вы можете нажать и удерживать клавишу вверх/вниз, чтобы вручную отрегулировать положение массажных роликов, чтобы они соответствовали вашей форме для уникального индивидуального массажа. Нажмите и удерживайте эту клавишу еще раз, чтобы выключить массажное кресло.
(Таймер массажа по умолчанию установлен на 20 минут)
-  **Уровень давления пневмоподушек:**
Нажмите эту клавишу, чтобы отрегулировать уровень давления воздуха, вы можете переключаться между настройками уровня 1, 2, 3, 4, 5 интенсивности давления воздуха, загорится соответствующий индикатор.
-  **Массаж пневмоподушками:**
Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать массаж пневмоподушками, вы можете переключаться между пневмоподушками в верхней части тела, в нижней части тела, всего тела, отключением пневмоподушек, загорится соответствующий индикатор.
-  **Все тело/Точечный/Частичный:**
В режиме ручного массажа нажмите эту клавишу, чтобы переключиться между режимами полного/точечного/частичного массажа.
Массаж всего тела: массажный механизм перемещается вверх и вниз по всей спине, бедрам и ягодицам, мигает соответствующий индикатор.
Точечный массаж: фокусирует массаж в выбранной точке. Вы можете перемещать механизм вверх/вниз, нажимая клавишу регулировки механизма вверх/вниз, будет мигать соответствующий индикатор.
Частичный массаж: фокусирует массаж в выбранной зоне. Вы можете перемещать механизм вверх/вниз, нажимая на механизм вверх/вниз, клавиша регулировки вниз, будет мигать соответствующий индикатор.
-  **Техники массажа:**
В ручном режиме нажмите эту клавишу для переключения между методами разминания, постукивания, шиацу, растирания, синхронизации и поколачивания, загорается соответствующий индикатор.
-  **Ширина зоны массажа:**
В ручном режиме нажмите эту клавишу, чтобы переключиться между широкой, узкой и средней шириной зоны массажа, загорается соответствующий индикатор. Ширина не регулируется в режиме разминания, растирания или синхронного массажа.
-  **Скорость массажа:**
В ручном режиме нажмите эту клавишу для переключения между настройками скорости уровня 1, 2, 3, 4, 5, загорится соответствующий индикатор загорится соответствующим образом.
-  **Время:**
Нажмите эту клавишу для переключения между таймерами массажа на 10, 15, 20, 25 и 30 минут.

▶ НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

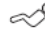- ZERO** Нулевая гравитация:
Нажмите эту клавишу для переключения между положением нулевой гравитации 1, положением нулевой гравитации 2, и выключением положения нулевой гравитации.
-  Подогрев:
Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать параметры нагрева, загорится соответствующий индикатор. Вы можете переключаться между уровнями 1, 2, 3 и выключением.
-  Массаж подошвы:
Нажмите эту клавишу для переключения между уровнями 1, 2, 3 и выключением массажа подошвы.
-  Механизм вверх/вниз:
Нажмите и удерживайте клавишу подъема/опускания механизма, чтобы переместить механизм в желаемое положение, при этом загорится соответствующий индикатор вверх/вниз.
-  Подъем спинки:
Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы поднять спинку; отпустите клавишу, чтобы остановить подъем.
-  Опускание спинки:
Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы опустить спинку. Отпустите клавишу для остановки опускания.
-  Защита от детей:
Защита от детей включена по умолчанию, когда массажное кресло подключено к источнику питания, пульт управления заблокирован и не работает. Нажмите и удерживайте данную клавишу в течение 5 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать пульт управления. Загорится соответствующий индикатор.


Вращающийся переключатель

Нажмите и удерживайте клавишу питания, чтобы включить/выключить питание; короткое нажатие клавиши питания для переключения автоматических программ, поверните этот переключатель, чтобы поднять/опустить спинку.

▶ ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перемещение массажного кресла

- ▶ Перекатите кресло на роликах в нужное место.
- ▶ Установите спинку в вертикальное положение.
- ▶ Выключите переключатель питания и отключите массажное кресло от электрической розетки.
- ▶ С помощью второго человека надавите на спинку и поднимите переднюю часть кресла, взявшись за ручку для перемещения, расположенную в передней нижней части подлокотника), перекатите кресло на роликах в нужное место (см. рисунок для справки).

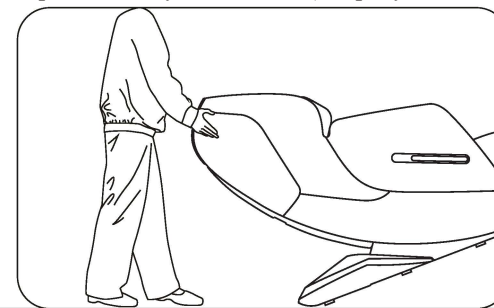


ОСТОРОЖНО

- ▶ Не перемещайте кресло, если в нем находится человек.
- ▶ Для перемещения массажного кресла не поднимайте его за подножку или подлокотники. Крепко держитесь за спинку (переносить кресло должны 4 или более человек).

Подключение питания

- ▶ Подключайте массажное кресло к правильно заземленной розетке.
- ▶ Подключайте массажное кресло к заземленной розетке. Включите главный переключатель питания с правой стороны массажного кресла.

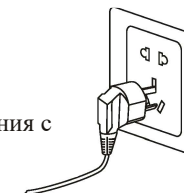

ОСТОРОЖНО


- ▶ Перед включением массажного кресла убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- ▶ Перед подключением к сети убедитесь, что главный переключатель питания выключен.

▶ ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Распаковка массажного кресла

- ▶ Откройте коробку, снимите стяжки и достаньте компоненты массажного кресла.


- Поднимите коробку

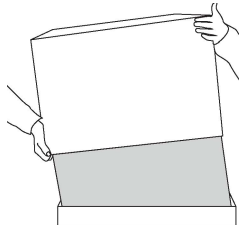

- Опустите подножку
- Установите сенсорный пульт управления

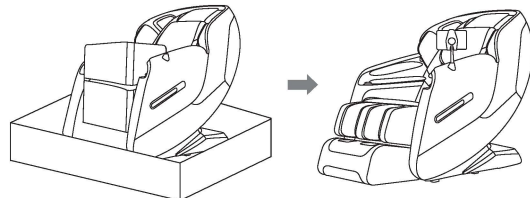

- ▶ Снимите фиксирующие стяжки и поднимите коробку вертикально, затем опустите блок подножки.
- ▶ Достаньте руководство пользователя, шнур питания, пульт управления с сенсорным экраном и подставку для пульта управления.
- ▶ Достаньте резиновый наконечник, вставьте нижний конец подставки пульта управления в гнездо и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать подставку на месте, подключите пульт управления в разъемы. Вставьте шнур питания в кресло и подключите его к розетке, включите главный переключатель питания, все готово (см. рис. ниже).

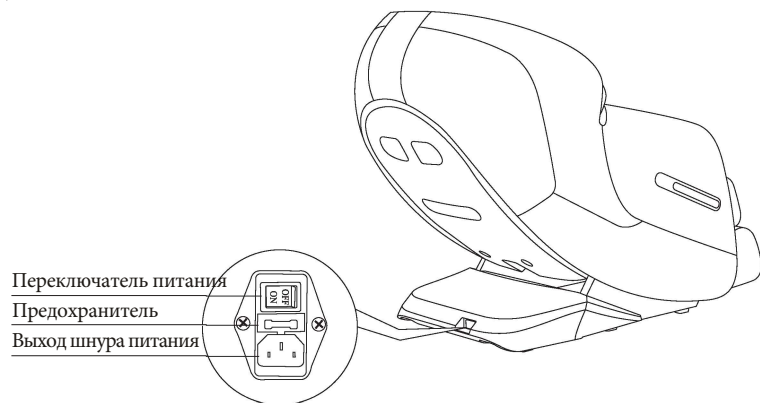

⚠ ОСТОРОЖНО

- ▶ Не разбирайте массажное кресло самостоятельно во избежание его поломки.
- ▶ Не допускайте попадания воды и других жидкостей на пульт управления во избежание его поломки.
- ▶ Не передавливайте и не зажимайте пульт управления или шнур питания.

▶ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Активация голосового управления

Поддерживаемый язык: английский

Модуль голосового управления можно активировать, сказав в микрофон "Hello, Hello" («Привет, привет»). Произнесите эту команду для перезапуска массажного кресла при его отключении.

Голосовые команды:

Команда	Ответ
Привет, привет	Произнесите голосовую команду
Включение	ОК, включение
Выключение	ОК, выключение
Мастер массажа	ОК, мастер массажа
Восстановление после спорта	ОК, восстановление после спорта
Мягкий уход	ОК, мягкий уход
Семейный режим	ОК, семейный режим
Облегчение боли	ОК, облегчение боли
Время отдыха	ОК, время отдыха
Точечный массаж	ОК, точечный массаж
Смена программы	ОК, смена программы
Включить музыку	ОК, включить музыку
Выключить музыку	ОК, выключить музыку
Включение массажа подошвы	ОК, включение массажа подошвы
Выключение массажа подошвы	ОК, выключение массажа подошвы

▶ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Функции голосового управления


- ▶ Каждое действие массажного кресла может сопровождаться голосовой подсказкой.
- ▶ Голосовые подсказки:

Клавиша пульта управления	Голосовая подсказка
Включение/Выключение	Включение/Выключение
Мастер массажа	Мастер массажа
Восстановление после спорта	Восстановление после спорта
Мягкий уход	Мягкий уход
Успокаивающая музыка	Выключение музыки, выключение голосовых подсказок
Семейный режим	Королевское похудение, массаж для мужчин, программа для пожилых пользователей
Облегчение боли	Шея и плечи, поясница и бедра, спина и позвоночник
Время отдыха	Режим игры, режим кофеврежек, режим быстрого сна
Точечный массаж	Массаж шеи, плеч, спины, поясницы, бедер, ног
Механизм вверх/вниз	Механизм вверх, механизм вниз
Спинка вверх/вниз	Подъем спинки, опускание спинки
Время	10 минут, 15 минут, 20 минут, 25 минут, 30 минут
Нулевая гравитация	Положение нулевой гравитации 1, 2, отключение
Подогрев	Уровень подогрева 1, 2, 3, отключение подогрева
Подолва (ручное управление)	Уровень скорости ролика 1-3, отключение ролика
Ширина зоны массажа	Широкая, узкая, средняя
Скорость массажа	Уровень скорости 1-5
Техники массажа	Разминание, постукивание, шиацу, растирание, синхронный, поколачивание
Все тело/точечный/частичный	Массаж всего тела, точечный массаж, частичный массаж
Массаж пневмоподушками	Массаж пневмоподушками верхней части тела, нижней части тела, всего тела, отключение пневмоподушек
Уровень давления воздуха	Уровень давления 1-5
Сканирование плеч	Сканирование плеч
Регулирование положения плеч (ручное)	Вы можете переместить механизм вверх/вниз, используя клавишу поднятия/опускания механизма

▶ ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ

1. Выезд вперед при раскладывании

Сиденье может выдвинуться вперед при раскладывании с целью экономии места и обеспечения максимально расслабляющего положения.

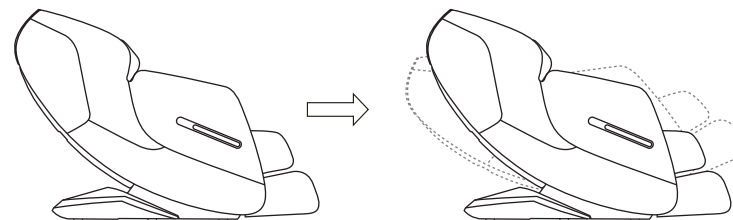

2. 3D-механизм

3D-механизм может вытянуться на 5 см для обеспечения более глубокого расслабления напряжения и боли в мышцах шеи, плеч и поясницы.

3. Автоматическое выдвижение подставки для ног

Подставка для ног может автоматически выдвигаться максимум на 26 см, благодаря чему кресло подходит для использования людьми разного роста.

4. Массаж пневмоподушками

36 пневмоподушек обеспечивают правильный расслабляющий массаж плеч, рук, поясницы, ног и ступней.

5. Большой диск для массажа ног

Два диска с выпуклостями обеспечивают имитацию ручной стимуляции и массажа шиацу рефлекторных зон на ступнях.

6. Программы ручного массажа

Имитация человеческой руки: растирание мышц, шиацу, разминание, синхронизация, постукивание для настройки массажа под нужды пользователя.

7. Простой в использовании пульт управления

Легкий и простой в использовании пульт управления обеспечивает быстрое понимание и доступ к функциям.

8. Голосовое управление

Вы можете включить/выключить массажное кресло, запустить/переключить автоматическую или ручную программу массажа, произнеся команду, что освобождает ваши руки и позволяет полностью расслабиться.

9. Удлиненная L-образная направляющая

Умная система сканирования тела обеспечивает точный выбор зоны массажа шеи, плеч, спины, поясницы, бедер и ног.